

DeLaval mastittest CMT



Art nr

92065113	Komplett testset
92065114	Testvätska refill, 1 liter
4000620	Testplatta

DeLaval CMT kan användas

för kontroll av mjölken från tank/spann och för att undersöka en eller flera juverdelar.

DeLaval CMT visar juvrets hälsotillstånd – varnar långt innan man kan observera synliga förändringar i mjölken som flockor, tunn/vattning m m. Redan en indikation över 200.000 celler kan vara inledningen till en kommande mastit.

När ska DeLaval CMT användas?

- För att regelbundet kontrollera besättningens juverhälsa.
- För att undersöka vilka kor och juverdelar som förorsakar ett högt celltal vilket kan medföra avdrag på mjölklikviden.
- Vid försäljning och köp av kor.
- Börja övervakningen 10-14 dagar före sinläggning för att kontrollera hur juvret klarar laktationen.
- Intensifiera kontrollen vid sinläggning, avslutas först 8 dagar efter kalvning.

För att kunna förebygga mastit bör alla kor testas en gång i månaden

Bruksanvisning


1.

Använd inte den allra första mjölken. Mjölka varje juverdel i varsin kopp.




2.

Håll ut överskottsmjolk till dess den nedre markeringen syns tydligt.

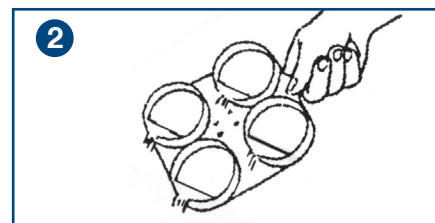


3.

Dosera därefter DeLaval CMT i kopparna. Ett pumps slag per kopp.

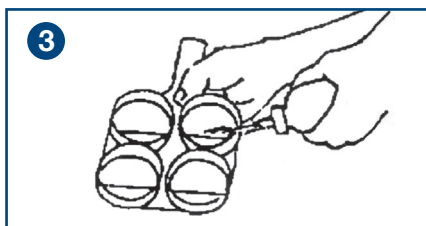

4.

Rotera testplattan lätt. Resultatet visar sig inom några sekunder.

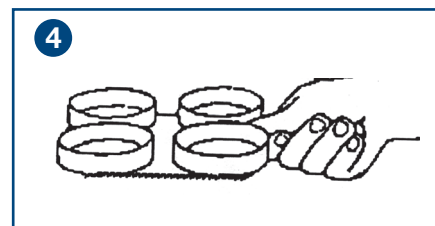

Vid mastitproblem – kontakta din veterinär!

Antal celler	Negativ 0-200.000	Svagt positiv 150.000- 500.000	Positiv 400.000- 1.500.000	Starkt positiv 800.000- 5.000.000	Extremt positivt > 5.000.000
Blandningens utseende	Tunn och vattnig utan slem.	Slemmig, men slemmet försvinner efter 30 sek när man roterar testplattan.	Mjölken blir tjockflytande vid rotation, men det bildas ingen gelé.	Tydlig gelé som ej försvinner när man roterar testplattan.	Tjock gelé som fastnar i testplattan. Gelén roterar mycket sakt i förhållande till plattans rotation.
Avläsning av prov från en juverdel	Ingen mastit.	Ingen allvarlig mastit.	Synlig mastit.	Kronisk mastit.	Allvarlig mastit. Fara för kornas allmän-tillstånd.
Avläsning av prov från spannmjolkning	Ingen mastit.	Kon kan ha mastit i en eller flera juvedelar.	Tydlig mastit. Kontrollera alla fyra juvedelarna.	Tydlig mastit. Kontrollera alla fyra juvedelarna.	Allvarlig mastit. Kontrollera alla fyra juvedelarna.
Avläsning av prov från mjölk-tank	Enskilda kor kan ha mastit.	20-30% av korna har förmodligen mastit.	40-60% av korna har förmodligen mastit.	60-80% av korna har förmodligen mastit.	80-100% av korna har förmodligen mastit.